



## COJINES ANTIESCARAS



### 1. INTRODUCCIÓN.

Con este manual se pretende proporcionar al cliente las pautas de operación, mantenimiento e instrucciones en el uso de los productos:

MODELO	REFERENCIA
Herradura	CAH0001
Cuadrado con Orificio	CCA0001
Circular	CAD0001

SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES GENERALES.

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS DAÑOS O DETERIOROS CAUSADOS POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EFECTUADAS EN EL EQUIPO POR PARTE DEL USUARIO.

### 2. USO PREVISTO.

Los cojines antiescaras se emplean en la prevención y tratamiento de lesiones en la piel producidas debido a la presión prolongada ejercida sobre ésta.

Está destinado a aquellos casos en los que el paciente debe mantenerse durante mucho tiempo en una misma postura, o apoyado sobre una silla o una cama. De este modo, el papel principal de este producto es reducir al máximo posible la presión que nuestro cuerpo ejerce sobre el punto de apoyo, como puede ser el glúteo o la zona posterior de la pierna.

### 3. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Los cojines antiescaras consiguen gracias a su diseño y material de relleno y recubrimiento repartir los puntos de presión corporal en una superficie mayor, por lo que se reduce la presión en los puntos concretos donde las escaras aparecen con más frecuencia,

### 4. CONTRAINDICACIONES.

- El producto no se puede usar en contacto directo con la piel del paciente con el fin de evitar enrojecimiento, reacciones alérgicas o reacciones adversas en general.
- El material empleado en contacto con la piel del paciente es hipoalergénico y suave, pero ello no descarta la posibilidad de que en determinados casos se produzcan episodios de alergias, dermatitis, rozaduras, hinchazón o irritaciones. En ese caso retirar el cojín y consultar al médico.

### 5. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO.

- En caso de que el producto presente roturas o deformaciones no debe ser usado.
- Emplear el producto sobre asientos con dimensiones suficientes como para albergar el producto sin deformaciones, y en lugares sin inclinación excesiva.

- Realizar controles periódicos de la zona y de la piel del paciente.
- Cualquier modificación que se realice sobre el cojín que no haya sido expresamente autorizado por el fabricante no garantiza su función terapéutica.

El fundamento del funcionamiento consiste en provocar una disminución de la presión aplicada sobre la piel causante de lesiones como úlceras y escaras en las zonas cercanas al punto de apoyo del cuerpo del paciente.

### 6. INSTRUCCIONES DE USO.

- Colocar el cojín sobre la superficie donde va a permanecer el paciente (cama, sillón, silla, sofá). En caso de que el producto presente hueco, asegurar que el mismo permanezca en el centro del asiento para conseguir la posición más cómoda.
- Dispone de unas tiras para poder fijar el cojín, siempre que el paciente permanezca sentado en una silla, silla de ruedas o sillón.
- En caso de utilizar el cojín en cambios posturales, realizar el cambio y colocar el producto al lado de tal manera que nos ayude a mantener el cambio postural, y observando al mismo tiempo que el paciente se encuentre correctamente posado sobre el producto y cómodo.

Ante cualquier duda o problema se recomienda la revisión o supervisión de un profesional sanitario o técnico ortopédico.

### 7. RETIRADA DEL COJÍN Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO.

- Retirar el producto desatando los lazos.
- Lavar el producto antes de guardarlo, tal y como se indica en el punto 7 del presente Manual.
- Cuando no utilice el producto guárdelo en un lugar seco y protegido de la luz y la humedad.
- No es necesario que el producto se conserve en la envoltura original, aunque se recomienda el embolsado en una bolsa de uso doméstico durante su almacenamiento, con el fin de protegerlo y mantener unas mínimas condiciones de higiene.

### 8. RECOMENDACIONES DE LAVADO Y CONSERVACIÓN

- Funda no extraíble.
- Puede limpiarse utilizando una esponja húmeda con algún producto desinfectante
- neutro.

- No utilizar secadora.
- No usar lejía, blanqueantes de color o productos abrasivos.
- No planchar.
- Permite limpieza en seco con percloroetileno, disolventes fluorados y esencias minerales, pero con restricciones de adición de agua y de temperatura.
- Mantener en un lugar seco y protegido de la luz solar y la humedad.

### 9. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO Y SU EMBALAJE

**ADVERTENCIA: El producto es reutilizable. La eliminación del mismo está indicada cuando se detecten signos de desgaste y/o decoloración en el mismo.**

Para el desecho del envase y del producto, siga la normativa de su comunidad.

### COMERCIAL BARMA MARESME, S.L.

C/ Romero Torres nº 20  
Pineda de Mar, Barcelona, ESPAÑA.

garmedicalmaresme@gmail.com



*Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante en la dirección C/ Romero Torres nº 20 Pineda de Mar, Barcelona, ESPAÑA. O en el correo electrónico [garmedicalmaresme@gmail.com](mailto:garmedicalmaresme@gmail.com), y a la Autoridad competente de su Estado miembro.*